

Hjertestartere i Røde Vejrmølle Parken

Grundejerforeningen har leaset to hjertestartere fra Falck.

Begge er placeret udendørs til benyttelse døgnet rundt:

Ved fælleshuset Væremøllen



I Præstehusene ved nr.77



Hvis man får brug for e`n, så følg den instruktion som apparatet automatisk gennemgår når det er startet.

Se også de næste 3 sider for en simpel instruktion, samt kig gerne på denne info side:

: <https://falck.23video.com/video/823082/falck-hjertestarter>

Når hjertestarteren har været brugt skal der gives besked til bestyrelsen for service / eftersyn / genstart

PS. Når døren åbnes startes en sirene, det er en form for tyverisikring, glem det hvis der virkelig er brug for hjertestarteren. Kan af-stilles af et bestyrelses medlem.


28-06-2017 Jesper Krogh

REAKTION I EN NØDSITUATION MED EN PATIENT MED PLUDSELIGT HJERTESTOP

Bliver der ikke givet nogen behandling, medfører pludseligt hjertestop døden. I en situation med pludseligt hjertestop er det vigtigt at huske straks at tilkalde hjælp og at aktivere hele nødberedskabet.

Grundlæggende trin for brug af defibrillatoren LIFEPAK CR Plus eller LIFEPAK EXPRESS

Reaktion i en nødsituation med pludseligt hjertestop og brug af defibrillatoren omfatter følgende grundlæggende trin:

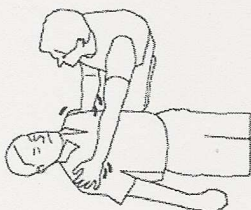


Fastslå, om patienten har pludseligt hjertestop. En person med pludseligt hjertestop reagerer ikke, når man rusker i vedkommende.



Kontrollér for vejtrækning ved at lægge øret til patientens bryst og se efter, om brystkassen bevæger sig.


Brug kun defibrillatoren, hvis patienten ikke reagerer, ikke bevæger sig og ikke har normal vejtrækning eller slet ikke ånder. Er der tvivl, så brug defibrillatoren.

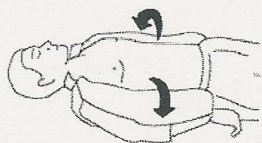

Placér defibrillatoren nær patienten på Deres side af patienten. Tryk på TÆND/SLUK knappen for at åbne låget og tænde defibrillatoren. Bevar roen. Defibrillatoren vil med stemme-meddelelser vejlede Dem gennem defibrilleringsprocessen.

Blot patientens brystkasse. Hvis brystkassen er meget behåret, så rasér hurtigt hår væk fra det område, hvor elektroderne skal placeres. Hvis patientens brystkasse er snavset eller våd, så tør brystkassen af, så den bliver ren og tør. Hvis der er medicinplastre på patientens brystkasse, så fjern dem.

Brug af Defibrillatoren

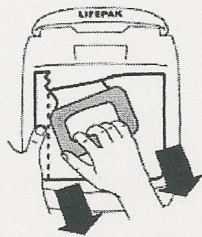

Hold venstre side af elektrodepakken nede med den ene hånd og træk nedad i det røde håndtag på elektrodepakken med den anden. Derved rives elektrodepakken op.


Riv pakken helt op og tag elektroderne ud. Et lille stykke af pakken bliver ved med at være hæftet på defibrillatoren.



Træk elektroderne fri af den blå plast – én ad gangen. Brug disse elektroder på voksne eller på børn over 8 år eller børn, som vejer 25 kg eller derover. Til spædbørn eller børn, der er under 8 år eller vejer mindre end 25 kg, skal der bruges særlige elektroder. Der henvises til side 5-9 for flere oplysninger.


ADVARSEL!

Hvis det ikke er muligt at fastslå barnets alder eller vægt, eller hvis det ikke er muligt at fremskaffe de særlige elektroder til spædbørn/børn, så fortsæt med de tilgængelige elektroder og gå videre med næste trin.

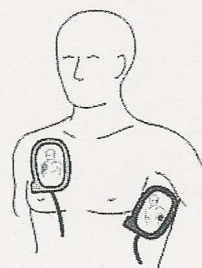


Sæt elektroderne på patientens blottede brystkasse (nøjagtigt som vist på billedet på elektroderne). Sørg for at anvende et kraftigt tryk, så elektroderne klæber tæt til patientens brystkasse.

Bemærk: Sørg for at undgå at placere elektroderne oven på en implanteret enhed såsom en implanteret pacemaker eller ICD. En indikation på en implanteret enhed kan være et fremspring i huden på brystet eller et ar. Er der tvivl, så placér elektroderne som vist på etiketterne.

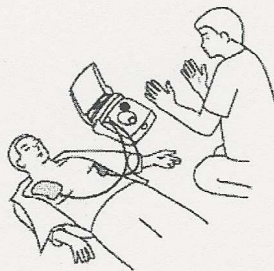


Lyt til stemmemeddelelserne og rør ikke ved patienten, medmindre instruktionerne direkte opfordrer til det.

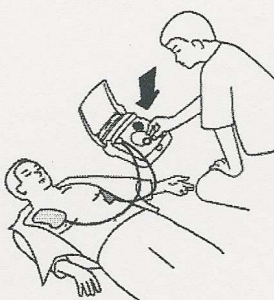

Hvis defibrillatorens analyse af hjerterytmen fastslår, at der er brug for et stød, vil defibrillatoren give meddelelsen FORBEREDER STØD og derefter give brugeren beskeden TRYK PÅ BLINKENDE KNAP for at give et stød (halvautomatisk model), eller den vil give meddelelsen FORBEREDER STØD og så automatisk give et stød uden yderligere indgreb fra brugeren (fuldautomatisk model).

Rør ikke ved patienten, mens der gives stød.

Uanset hvilken model der arbejdes med, så fortsæt med at følge stemmemeddelelsernes anvisninger.

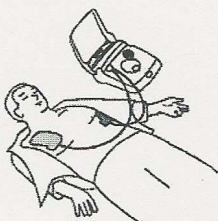

Fjern ikke elektroderne fra patienten og afbryd ikke elektrodernes forbindelse til defibrillatoren, før de professionelle redningsfolk er ankommet. Hvis patienten begynder at bevæge sig, hoste eller trække vejret regelmæssigt, så anbring patienten i aflåst sideleje (som beskrevet under uddannelsen i hjerte- lungeredning) og hold vedkommende så meget i ro som muligt.